


# Handsender mit Fallsensor

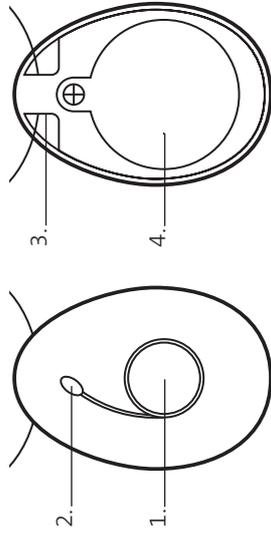

1. Alarmknopf
2. LED-Anzeige
3. Kordelbefestigung
4. Batteriefach

## Inbetriebnahme

**Schritt 1:** Setzen Sie die beigelegte Batterie in den Handsender ein.

**Schritt 2:** Drücken Sie am Notrufgerät die gelb umrandete Taste für ca. 3 Sekunden, bis diese blinkt.

**Schritt 3:** Drücken Sie am Handsender den Alarmknopf, bis das Notrufgerät einen Bestätigungston abgibt.

**Schritt 4:** Drücken Sie nochmals kurz die gelb umrandete Taste, bis sie nicht mehr blinkt. Der Handsender ist nun mit dem Notrufgerät verbunden.

## Reichweite testen

Machen Sie von verschiedenen Standorten in Ihrem Haus bzw. in Ihrer Wohnung aus einen Probealarm, um die Reichweite des Handsenders zu testen. Diese beträgt ca. 150 Meter zum Notrufgerät.

Drücken Sie dazu für ca. 2 Sekunden den Alarmknopf, bis die LED-Anzeige rot aufleuchtet.

**Tipp:** Dabei wird ein richtiger Alarm ausgelöst. Informieren Sie idealerweise Ihre Kontakte im Vorfeld über den Probealarm.

## In Betrieb

Wenn Sie den Alarmknopf für ca. 2 Sekunden gedrückt halten, leuchtet die LED-Anzeige rot auf und ein Alarm wird ausgelöst. Dieser kann nicht mehr gestoppt werden.

Bei einem Sturz löst der Fallsensor automatisch einen Alarm aus. Sobald die Batterie des Handsenders leer ist, löst das Notrufgerät einen technischen Alarm aus. Die Lebensdauer der Batterie beträgt ca. 2 Jahre.

## Hinweis

Der Handsender mit Fallsensor ist spritzwasserfest und muss über der Kleidung um den Hals getragen werden. Dazu darf ausschliesslich die beigelegte Kordel verwendet werden. Aus funktionalen Gründen ist es zudem nicht erlaubt, einen Knoten in die Kordel zu machen.

## Im Fall der Fälle bereit

Testen Sie Ihren Handsender mit Fallsensor auch nach der Inbetriebnahme regelmässig. So reagieren Sie im Ernstfall automatisch richtig.

Swisscom (Schweiz) AG  
Postfach  
3050 Bern